


מדריך מקוצר להפעלת טורניקט דו ערוצי Easy Pump

המכשיר כולל: צג מגע דיגיטלי ל: זמנים, לחץ, כיוון, שחרור, 2 מעגלים פועלים עצמאית, התראות, ושקעים לצינורות מנג'טה. המכשיר מאפשר התראות קוליות וויזואלית בטווחים של עד 600mmHg כולל גיבוי של סוללה לפעולה של עד 10 שעות. כל ערוץ ניתן לכיוון באופן עצמאי. מאפשר ספירת זמן עד 180 דקות, ובסיום כל זמן שנקבע, המכשיר מתריע באמצעות צפצוף והבהוב אך אינו מפסיק את פעולתו. למצב IVRA ניתן לעבור דרך מסך הגדרות.

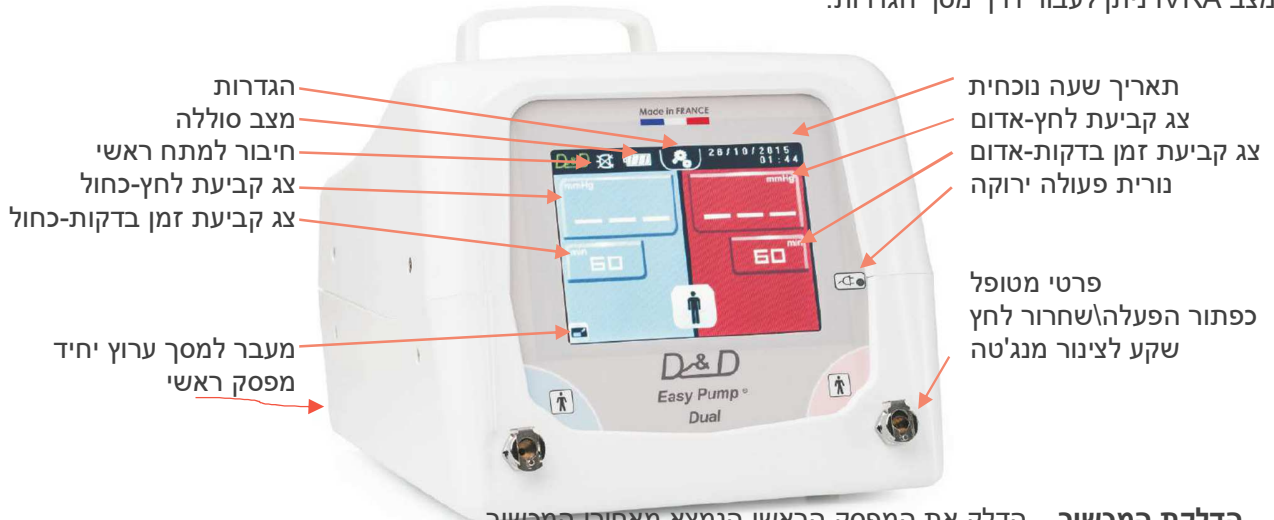

1. **הדלקת המכשיר.** הדלק את המפסק הראשי הנמצא מאחורי המכשיר. המכשיר מבצע בדיקה עצמית ונורית הפעלה ירוקה תידלק. לתחילת פעולה - הקלק עם האצבע על המסך
2. **חיבור מנג'טה.** חבר את צינור המנג'טה לשקע בחזית המכשיר.
3. **כיוון לחץ פעולה.** (ההנחיות הן עבור 2 הערוצים אדום\כחול) הקש עם האצבע על איזור ה-mmHg, ובמסך שיפתח, בחר את לחץ הפעולה הנדרש. לסיום הקש על V מימין למטה.
4. **כיוון משך זמן להתראה.** (ההנחיות הן עבור 2 הערוצים אדום\כחול) הקש עם האצבע על איזור ה-min, ובמסך שיפתח, בחר את משך הזמן הנדרש להתרעה. לסיום הקש על V מימין למטה.
5. **להתחלת פעולה: לחץ על הכפתור INFLATE**
6. **לסיום פעולה ושחרור לחץ: לחץ על כפתור DEFLATE למשך 2 שניות**
7. **התראות**
 - 7.1 המכשיר מתריע ואינו מפסיק פעולתו, כאשר: משך הזמן שנקבע עבר \ אחרי 3 שעות \ כאשר יש שינוי בלחץ.
 - 7.2 בעת התראה: הצג הרלוונטי יבהב (זמן או לחץ), צפצוף יישמע ונורית הצפצוף תהבהב, עד לנטרולה.
 - 7.3 לנטרול הצפצוף: לחץ על כפתור ביטול צפצוף
8. **לתשומת לב:**
 - 8.1 ניתן לשנות את ערכי הזמן והלחץ בכל עת.
 - 8.2 בהפסקת מתח, המכשיר ממשיך לשמור על הלחץ ועובר לעבוד על סוללות.
 - 8.3 ניתן לעבור לצפיית מסך יחיד על ידי לחיצה על כפתוח הגדל מסך ערוץ כחול בפינה שמאל למטה.



טורניקט דו ערוצי דיגיטלי

Easy Pump

מתוצרת DDM
 צרפת. 


מג'טות

Base	With fastening strap	Designation	Color of tube	Dimensions in cm		
				Cuff width	Cuff length	Overall length
GBDM101	GBDMS101	Cuff new born straight	White	3.5	29	38
GBDM102	GBDMS102	Cuff child straight	Pink	4.5	35	48
GBDM103	GBDMS103	Cuff small adult straight	Parma	6	46	61
GBDM104	GBDMS104	Cuff adult straight	Blue sky	8	46	67
GBCM105	GBCMS105	Conical cuff adult large	Turquoise	10	47	70
GCDM103	GCDMS103	Lower limb cuff adult straight	Yellow	8	76	97
GCDM104	GCDMS104	Lower limb cuff adult straight	Purple	10	62	76
GCDM105	GCDMS105	Lower limb cuff adult straight L	Green	10	76	90
GCDM106	GCDMS106	Lower limb cuff adult straight XL	Grey	10	82	100
GCDM107	GCDMS107	Lower limb cuff adult straight XXL	Red	10	107	122
GCCM104	GCCMS104	Conical lower limb cuff adult	Purple	10	62	76
GCCM105	GCCMS105	Conical lower limb cuff adult L	Green	10	76	90
GCCM106	GCCMS106	Conical lower limb cuff adult XL	Grey	10	82	100
GCCM107	GCCMS107	Conical lower limb cuff adult XXL	Red	10	107	122




ESMARCH BANDAGE

DISPOSABLE
Ref. BEU104
Dimensions in cm: 400 x 10

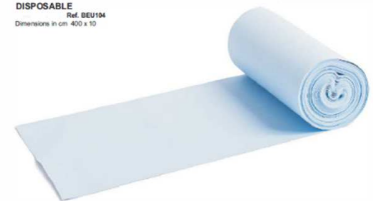

REUSABLE AND STERILIZABLE

Ref. Dimensions in cm:
MS100 500 x 6
MS105 500 x 10
MS110 500 x 15

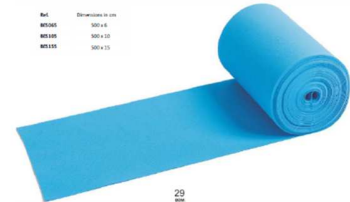

המדריך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להפלות בין המינים.
 המדריך הקובע הוא המדריך של היצרן בשפה האנגלית המצורף עם המערכת.